

Spray NASO LIBERO

con sale marino della Bretagna

DETERGE, IDRATA,
CURA E PROTEGGE



SPRAY NASO LIBERO

Deterge, idrata, cura e protegge le cavità nasali.
Dispositivo medico CE.

Istruzioni per l'uso, leggere attentamente!

Ogni giorno, inaliamo sostanze inquinanti attraverso il naso. I gas di scarico, l'ozono, la polvere, il polline e i virus mettono a dura prova le mucose nasali, mentre gli ambienti riscaldati le seccano ulteriormente. Le cavità nasali devono quindi essere accuratamente pulite dalle impurità e allo stesso tempo umidificate.

Cos'è Spray Naso Libero e quando utilizzarlo?

È una soluzione salina isotonica con sale marino della Bretagna e arricchita con estratti aromatizzanti al rooibos, coriandolo e cardo mariano. Pulisce delicatamente ma a fondo le cavità nasali da impurità come muco, incrostazioni e particelle di polvere inalate. Idrata le mucose nasali e lenisce le irritazioni in caso di reazioni allergiche al polline, all'inquinamento ambientale, ecc. Favorisce la guarigione di piccole lesioni superficiali della mucosa nasale.

Spray Naso Libero:

- è utilizzato per il trattamento sintomatico e di supporto della rinite (raffreddore) e della rinite allergica (raffreddore allergico);
- è utilizzato per la profilassi e il trattamento di supporto di tutti i disturbi causati dalle mucose nasali secche e irritate;
- protegge e pulisce le mucose nasali dagli effetti di influenze ambientali negative, come aria secca da riscaldamento, polvere, gas di scarico, ozono, polline, allergeni, batteri, spore e virus;
- allevia i sintomi del raffreddore, come la congestione nasale e la secchezza delle mucose nasali;
- allevia i sintomi dell'allergia al polline, come prurito e gonfiore, e riduce gli attacchi di starnuti (con uso regolare);

- lenisce e rigenera le mucose nasali e fornisce idratazione;
- riduce i processi infiammatori delle mucose nasali e il rischio di sinusite;
- dona sollievo, comfort e una sensazione di liberazione nel naso, favorendo quindi una respirazione migliore;
- è ben tollerato e privo di conservanti.

Cosa contiene Spray Naso Libero?

Acqua purificata, sale marino della Bretagna (0,9%), estratto di frutto di coriandolo (*Coriandrum sativum*), estratto di foglie di rooibos (*Aspalathus linearis*), estratto di cardo mariano (*Silybum marianum*), acido citrico monoidrato, bicarbonato di sodio, carbonato di sodio decaidrato, azoto (gas), glicerina.

Spray Naso Libero può essere utilizzato in sicurezza per un periodo di tempo prolungato?

Sì.

Quando non è possibile utilizzare Spray Naso Libero?

Il prodotto non può essere utilizzato in caso di allergie e ipersensibilità ad una o più sostanze contenute. In caso di lesioni nasali, sanguinamento delle mucose nasali o in seguito a interventi chirurgici al naso e ai seni paranasali, il prodotto non può essere utilizzato.

Non vi sono preoccupazioni in merito all'uso durante la gravidanza e l'allattamento.

Come si utilizza Spray Naso Libero?

Effettuare 1-2 nebulizzazioni fino a 4 volte al giorno, a seconda delle esigenze. Piegare la testa leggermente in avanti. Introdurre l'ugello nell'apertura nasale e premere brevemente la testina di nebulizzazione. Rilasciare la testina di

nebulizzazione per terminare l'applicazione. Pulire a fondo l'ugello dopo ogni utilizzo. Per motivi igienici, Spray Naso Libero non deve essere utilizzato da più persone. Adulti e bambini a partire da 2 anni.

Quali effetti collaterali può provocare Spray Naso Libero?

Ad oggi non sono noti effetti collaterali per Spray Naso Libero, se utilizzato correttamente. In singoli casi, quando si utilizza Spray Naso Libero, non è possibile escludere effetti indesiderati come: stimolo di tossire, un sapore amaro, sensazione di bruciore. L'accumulo di soluzione salina nei seni paranasali può causare un ritardo del drenaggio del fluido.

Cos'altro occorre osservare?

- Conservare lontano dalla portata dei bambini
- Non adatta a bambini di età inferiore a 2 anni
- Contenitore pressurizzato (azoto atmosferico, ambientalmente neutro e innocuo). Proteggere dall'irradiazione solare e dal calore.
- Non aprire con forza né gettare nel fuoco.
- Il prodotto può essere impiegato solo fino alla data di scadenza indicata.
- Evitare il contatto con gli occhi.
- Prima dell'applicazione, verificare l'integrità del prodotto.

Conservare al di sotto di 25 °C.

Nota: ogni incidente grave verificatosi in relazione al prodotto va segnalato al produttore e all'autorità competente del Paese in cui ha sede l'utente e/o il paziente.

Utente:

segnalazione al fabbricante o alla struttura sanitaria/farmacia di riferimento, o al medico di medicina generale che a sua volta lo segnala al fabbricante, e al ministero della salute con le modalità dell'operatore sanitario.



SVILUPPATO DA:
Just International AG
Dorf 62
9428 Walzenhausen
Svizzera



Just Italia - Via Cologne, 12
37023 Grezzana (VR)
Tel. 045 8658111
www.just.it



HÄLSA Pharma GmbH,
Maria-Goeppert-Straße 5,
23562 Lübeck, Germania;
info@haelsa.de
Prodotto in Svizzera

MD

CE
0482



Spiegazione dei simboli



Leggere le avvertenze sul foglietto illustrativo



Avvertenze



Proteggere dai raggi solari



Conservare ad una temperatura compresa tra i 5 e i 25°C.

MD

Dispositivo medico

CE

Marcatura CE

LOT

Numero di Lotto



Data di Scadenza



Produttore



Distributore

UDI

Identificazione unica del dispositivo

Istruzioni per l'uso aggiornate a:
2025-06, revisione 001